

Průvodce hygienou

HEKA

Navrženo pro hygienu

Přístroj Heka S+ je navržen tak, aby byl co nejhygieničtější a snadno se čistil. Součástí jsou dobře promyšlené detaily, jako je použití povrchu z tvrzeného skla, který je díky tvrdému a hladkému povrchu obzvláště účinný při čištění a dezinfekci.

Integrovaný dotykový displej znamená, že zde nejsou žádná tlačítka/spínače, na nichž se může usazovat prach a nečistota.

Celkové čištění povrchu

Všechny povrchy jednotky jsou buď z hliníku ošetřeného práškovým nátěrem, nebo z tvrzeného skla. Displej lze samozřejmě při čištění zamknout; po 2 minutách se automaticky odemkne, takže je jednotka vždy před dalším pacientem připravená. Všechny kontaktní body - držáky a madla nástrojů - lze jednoduše odstranit pro jednodušší čištění a zpracování v autoklávu. Totéž platí o madlech OP lampy.



Automatické proplachování nástrojů

Účinné proplachování vodního systému jednotky a hadic nástrojů je hlavním faktorem při udržování jednotky bez biofilmů. Automatické proplachování nástrojů

usnadňuje každodenní proplachování hadic nástrojů i proplachování mezi pacienty - rychle a účinně. Po propláchnutí nástroje je možné jednoduše aktivovat proplachování plivátka, aby se také propláchl tato část vodního systému.



Systém čištění odsáváním

Pomocí automatického sání se aktivuje tryska na konci sacích hadic, která nepřetržitě čistí sací systém chemickými přípravky nebo pouze čistou vodou a pomáhá udržovat celý sací systém, aby byl čistý a efektivní.

Během práce s pacientem je možné aktivovat proplachování s chemikáliemi nebo pouze s vodou.

To zajišťuje efektivní odstranění veškerých nečistot, aniž by hadice vyschla, aby se zabránilo ztvrdnutí nečistot uvnitř hadice.

Pravidelné proplachování pomocí aktivních chemických přípravků mezi pacienty nebo večer může zajistit snížení množství bacilů a bakterií, které vytvářejí kolonie.



Miska plivátka / ventil plivátka / eventuálně separátor amalgámu

Zajišťuje efektivní tok vody ze systému plivátka. Separátor amalgámu také odstraní amalgám z vody v plivátce.

Misku plivátka lze snadno sejmout a vyčistit.



Čištění aktivní vody

Pokud se zvolí aktivní purifikace vody, bude aktivní čisticí kapalina dávkována do vodního systému jednotky nepřetržitě, aby bylo množství bakterií

nízké a nedocházelo k vytváření biofilmu.

Systém purifikace vody je k dostání ve dvou variantách, s otvorem na vodu schváleným DVGW nebo bez něj.



Postupy čištění jednotky


Ráno

- Nástroje propláchněte pomocí automatického proplachování nástrojů - dlouhý program
- Propláchněte sací systém pomocí automatického sacího čištění (nebo nasátím čisticí kapaliny).



Před každým pacientem

- Čištění a dezinfekce povrchů a hadic nástrojů, včetně rukojetí a polstrovaní křesla
- Krátké opláchnutí nástrojů pomocí automatického proplachování nástrojů
- Propláchnutí sacího systému aktivními chemickými přípravky, aby byly dezinfikovány zevnitř - sací ruční nástroje se vyčistí a oťrou schváleným dezinfekčním přípravkem.

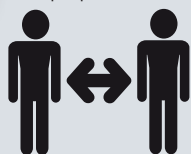


Večer

- Sací systém opláchněte aktivními chemickými látkami. Sací ruční nástroje se sejmou a očistí v souladu s předpisy kliniky
- Zkontrolujte a vyčistěte filtry v sacích hadicích
- Sejměte rukojeti a držák nástroje - očistěte a dezinfikujte v autoklávu v souladu s předpisy praxe.



Další (dle potřeby)

- Zkontrolujte, a pokud je to zapotřebí, znovu použijte chemické přípravky do sacího čištění a/nebo purifikace aktivní vody
- Zkontrolujte ventil plivátka/filtr odpadu, a pokud je to zapotřebí, vyčistěte
- Když je nádobka na amalgám plná, vyměňte ji.

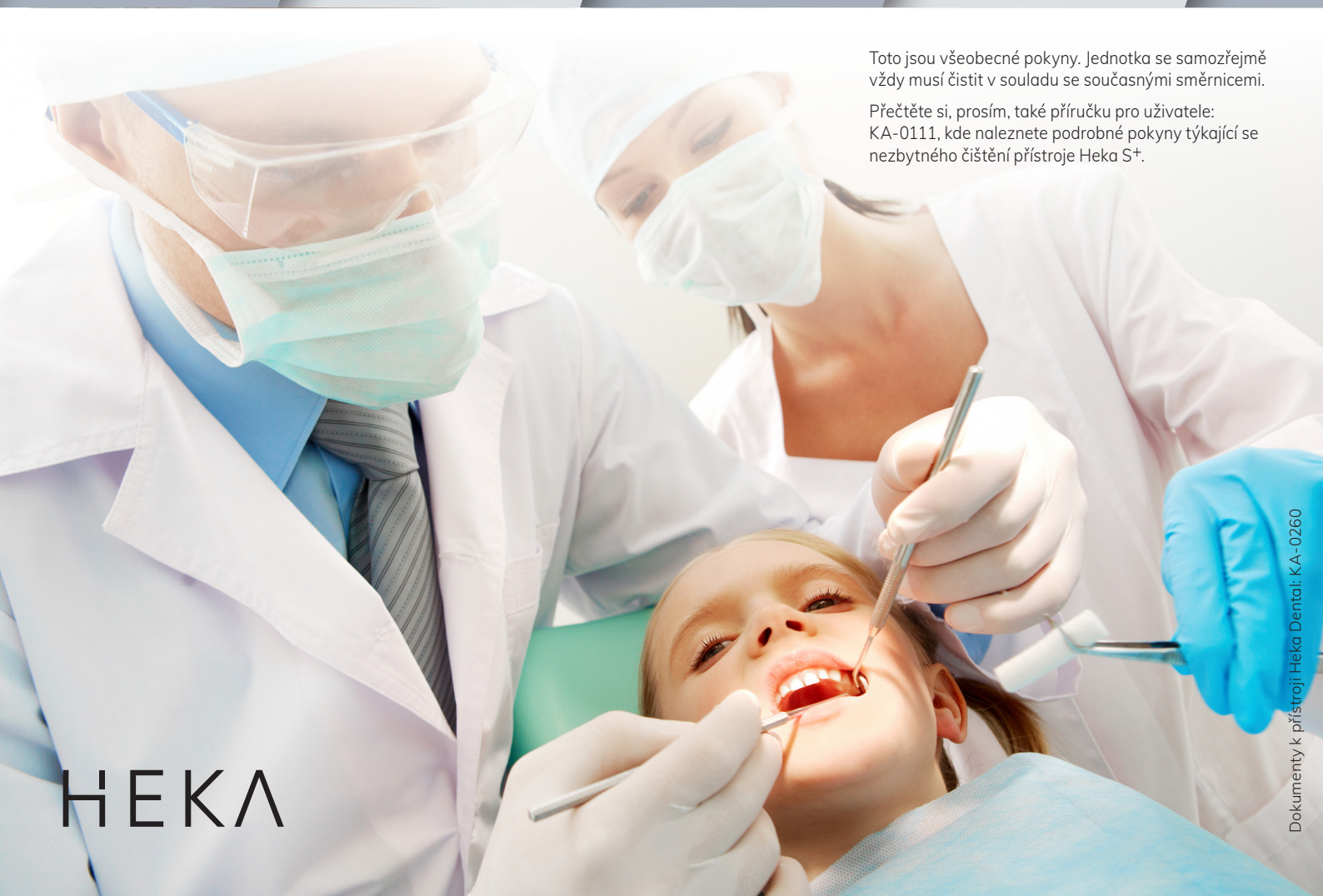

Toto jsou všeobecné pokyny. Jednotka se samozřejmě vždy musí čistit v souladu se současnými směrnici.

Přečtěte si, prosím, také příručku pro uživatele: KA-0111, kde naleznete podrobné pokyny týkající se nezbytného čištění přístroje Heka S+.

HEKA