


BRUGSANVISNING

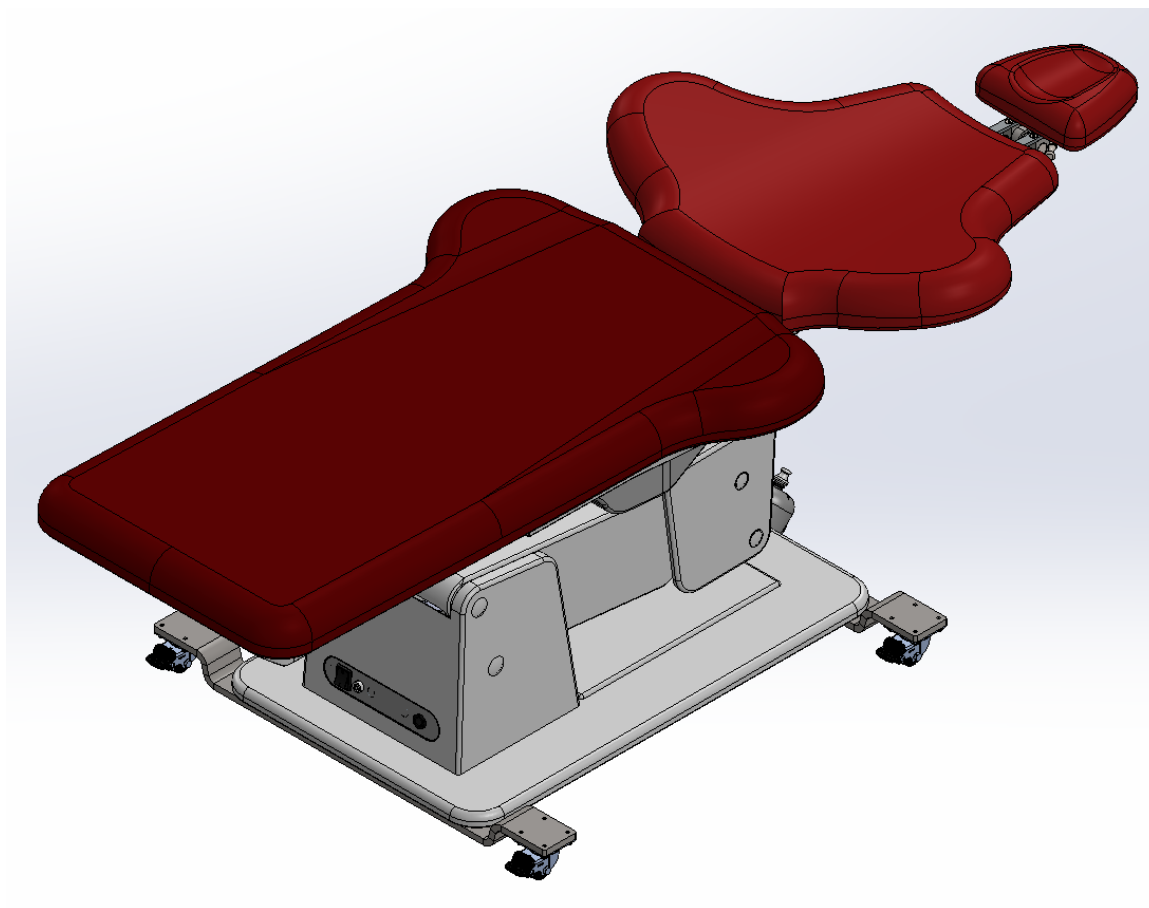


Mobile Kit Classic tilbehør til UnicLine Chair samt Patientstol+

Beskrivelse af udstyret – SB-1390

Mobile Kit Classic til UnicLine Chair (SB-0800) og Patientstol+ (SB-0820) er et tilbehør bestående af et hjulsæt med fire hjul, designet til montage på patientstolen og – mellem dentale behandlinger – til at gøre patientstolen fysisk flytbar.

Oversigt over Mobile Kit Classic

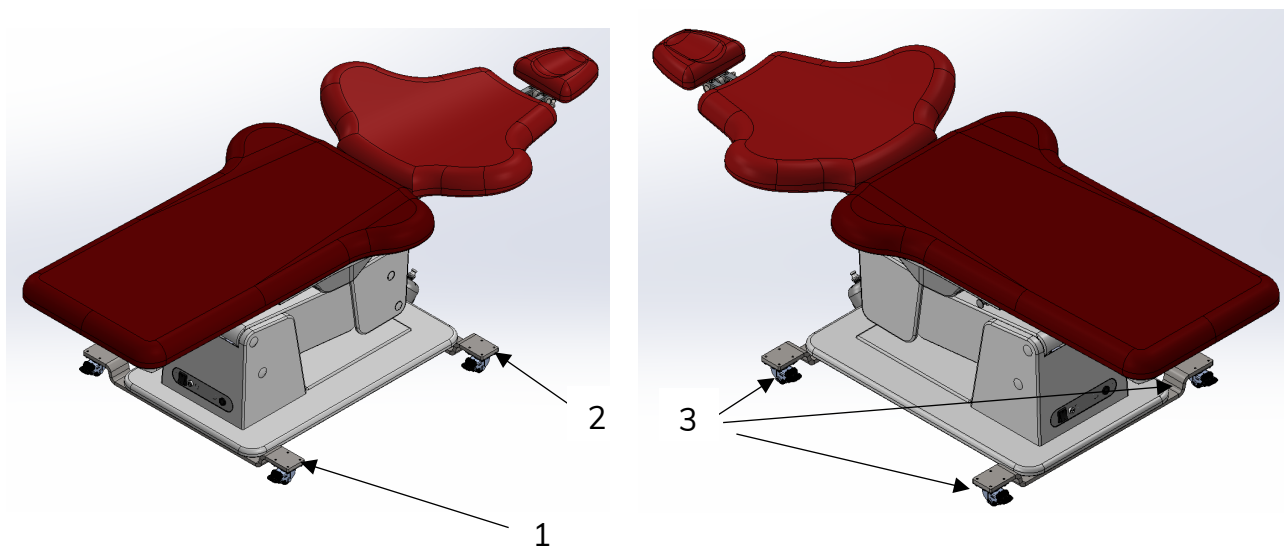

1	Hjulbeslag til patient fodende
2	Hjulbeslag til patient hoved ende
3	Hjul med bremse på alle fire hjul

Sikkerhedsinstruktioner

De vedlagte sikkerhedsinstruktioner er udelukkende målrettet tilbehøret Mobile Kit Classic.

Vær opmærksom på de overordnede sikkerhedsinstruktioner i betjeningsvejledningerne for hhv. UnicLine Chair (KA-0033) og for Patientstol+ (KA-0034).

Mobile Kit Classic må kun påmonteres på patientstole, som anvendes på gulv af beton, keramiske fliser eller andet ikke-brændbart materiale i overensstemmelse med ovennævnte monteringsvejledninger (KA-0033 og KA-0034).

WARNING

Beskadiget kabel.

Elektrisk stød som følge af et beskadiget 230V kabel kan medføre alvorlige personskader eller dødsfald.

- Kontrollér 230V kablet for skader efter flytningen.
- Patientstolen må ikke anvendes, hvis 230V kablet er beskadiget. Sluk straks for patientstolen, hvis den allerede er tændt.
- Kontakt en Heka Certified technician (HCt), hvis 230V kablet skal udskiftes.

CAUTION

Kollision

Kollision med patienter, møbler og andet udstyr kan medføre mindre til moderate personskader.

- Patientstolen med Mobile kit påmonteret må ikke flyttes/køres med patienter i denne.
- Der må ikke være patienter i rummet mens patientstolen med påmonteret Mobile kit flyttes.
- Kontrollér, at området er frit for forhindringer, før patientstolen med Mobile kit påmonteret flyttes.
- Kontrollér, at patientstolen med Mobile kit påmonteret er frakoblet andet udstyr, inden hjulbremser slås fra og stolen flyttes.
- Kontrollér, at hjulene (alle fire) er låst, når stolen, med Mobile kit påmonteret, er flyttet til ny placering.
- Kontroller at den nye placering af stolen med Mobile kit påmonteret har tilstrækkelig afstand til vægge og øvrige forhindringer, samt at afstanden til den dentale unit er i overensstemmelse med betjeningsvejledningerne.

NOTICE

Begrænsninger for patientens vægt

UnicLine Chair (SB-0800) og Patientstol+ (SB-0820) er EN/ISO 6875-godkendt til en belastning på 179 kg (398 lb).

Den maksimale belastning på 179 kg er også gældende for patientstol med Mobile Kit Classic påmonteret.

Overskrides denne vægtgrænse, fungerer patientstolen muligvis ikke korrekt.

- Sørg for, at der i patientstolen ikke placeres patienter, som overskrider vægtgrænsen.

Introduktion til betjening

Hjulbremsen aktiveres og slås fra med foden.



Hjulbremsen aktiveret



Hjulbremsen er slået fra

For at flytte stolen:

- Stolen frakobles andet udstyr, samt 230V kabel
- Slå hjulbremse fra på alle fire hjul
- Skub stolen langsomt med begge hænder

Når stolen er flyttet:

- Placer stolen med korrekt afstand til den dental unit samt overhold afstand til vægge samt øvrige forhindringer.
- Aktivér hjulbremsen på alle fire hjul
- Tilslut stolen efter anvisningerne

Rengøring

Mobile kit rengøres efter samme vilkår som anbefalingerne for rengøring af patientstolen beskrevet i hhv. betjeningsvejledningerne for UnicLine Chair samt Patientstol+.

Årlig service

NOTICE

Årlig vedligeholdelse

Manglende vedligeholdelse kan føre til funktionsfejl og medføre materielle skader.

- Brugeren er ansvarlig for at sikre, at udstyret gennemgår årlig vedligeholdelse, og for løbende at kontrollere, at alle funktioner fungerer korrekt.
- Service og vedligeholdelse må kun udføres af en Heka Certified technician (HCt).
- Udfør ikke service eller vedligeholdelse med en patient siddende i stolen.

Ved årlig service kontrolleres:

- Bremsefunktion på alle fire hjul.
- Uhindret dreje- og rullebevægelse på alle fire hjul.

HEKA

Heka Dental A/S
Litauen Alle 4
DK-2630 Taastrup
Denmark
T: +45 4332 0990
M: info@heka-dental.dk
heka-dental.com



Homepage



Facebook



LinkedIn



Instagram