


BRUKSANVISNING

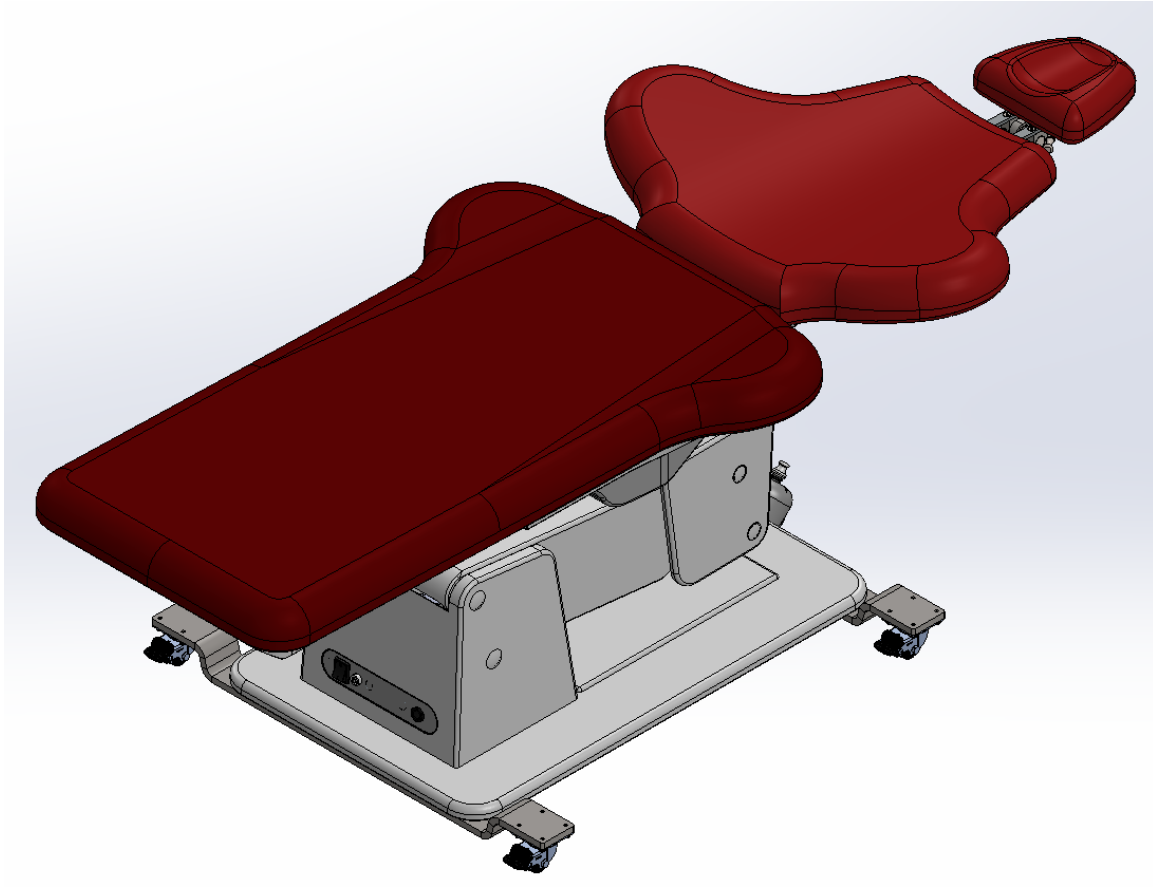


Mobile Kit Classic

Tilbehør til
Pasientstol og Pasientstol+.

Beskrivelse av utstyret - SB-1390

Mobile Kit Classic for Pasientstol (SB-0800) og Pasientstol+ (SB-0820) er et tilbehør som består av et hjulsett med fire hjul, beregnet for montering på pasientstolen og - mellom tannbehandlinger - for å gjøre pasientstolen fysisk bevegelig.

Oversikt over Mobile Kit Classic

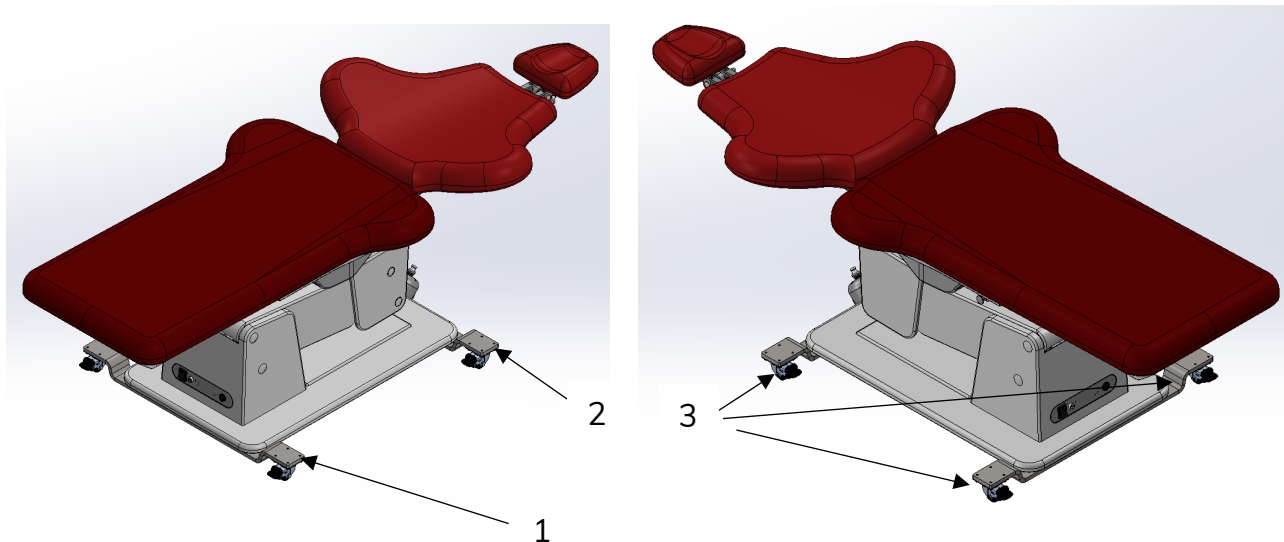

1	Hjulbrakett for pasientfotenden
2	Hjulbrakett for pasientens hodeende
3	Hjul med bremser på alle fire hjulene

Sikkerhetsinstruksjoner

De vedlagte sikkerhetsinstruksjonene gjelder kun for Mobile Kit Classic-tilbehøret.

Vær oppmerksom på de generelle sikkerhetsanvisningene i bruksanvisningen for Pasientstol (KA-0033) og Pasientstol+ (KA-0034).

Mobile Kit Classic må kun monteres på pasientstoler som brukes på gulv av betong, keramiske fliser eller annet ikke-brennbart materiale i samsvar med ovennevnte monteringsanvisninger (KA-0033 og KA-0034).

WARNING

Skadet kabel.

Elektrisk støt på grunn av en skadet 230 V-kabel kan forårsake alvorlig personskade eller død.

- Kontroller 230 V-kabelen for skader etter flyttingen.
- Ikke bruk pasientstolen hvis 230 V-kabelen er skadet. Slå av pasientstolen umiddelbart hvis den allerede er slått på.
- Kontakt en Heka Certified Technician (HCT) hvis 230 V-kabelen må skiftes ut.

CAUTION

Kollisjon

Kollisjon med pasienter, møbler og annet utstyr kan forårsake mindre til moderate skader.

- Ikke flytt/kjør pasientstolen med Mobile kit montert med pasienter i den.
- Det må ikke være noen pasienter i rommet mens pasientstolen med Mobile kit tilkoblet flyttes.
- Kontroller at området er fritt for hindringer før du flytter pasientstolen med Mobile kit montert.
- Sørg for at pasientstolen med Mobile kit er koblet fra annet utstyr før du kobler ut hjulbremsene og flytter stolen.
- Kontroller at hjulene (alle fire) er låst når stolen med Mobile kit flyttes til det nye stedet.
- Sørg for at det er tilstrekkelig avstand til vegger og andre hindringer på den nye plasseringen av stolen med Mobile kit, og at avstanden til tannlegeenheten er i samsvar med bruksanvisningen.

NOTICE

Begrensninger for pasientens vekt

Pasientstol (SB-0800) og Pasientstol+ (SB-0820) er EN/ISO 6875-godkjent for en belastning på 179 kg (398 lb).

Den maksimale belastningen på 179 kg (398 lb) gjelder også for pasientstolen med påmontert Mobile Kit Classic.

Hvis denne vektgrensen overskrides, kan det hende at pasientstolen ikke fungerer som den skal.

- Sørg for at ingen pasienter som overskrider vektgrensen, plasseres i pasientstolen.

Introduksjon til betjening

Hjulbremsen aktiveres og deaktiveres med foten.



Hjulbremsen er aktivert



Hjulbremsen er slått av

For å flytte stolen:

- Koble stolen fra annet utstyr og 230V-kabelen
- Slå av hjulbremsen på alle fire hjulene
- Skyv stolen sakte med begge hender

Når stolen er flyttet:

- Plasser stolen med riktig avstand til tannlegeenheten, og hold avstand til vegger og andre hindringer.
- Aktiver hjulbremsen på alle fire hjulene
- Koble til stolen i henhold til instruksjonene

Rengjøring av stolen

Mobile kit rengjøres i henhold til de samme betingelsene som anbefalingene for rengjøring av pasientstolen som er beskrevet i bruksanvisningen for henholdsvis Pasientstol og Pasientstol+.

Årlig service

NOTICE

Årlig vedlikehold

Manglende vedlikehold kan føre til funksjonsfeil og materielle skader.

- Brukeren er ansvarlig for at utstyret gjennomgår årlig vedlikehold, og for kontinuerlig å kontrollere at alle funksjoner fungerer som de skal.
- Service og vedlikehold må kun utføres av en Heka Certified technician (HCt).
- Utfør ikke service eller vedlikehold med en pasient sittende i stolen.

Kontroller under årlig service:

- Bremsfunksjon på alle fire hjul.
- Uhindret sving- og rullebevegelse på alle fire hjulene.

HEKA

Heka Dental A/S
Litauen Alle 4
DK-2630 Taastrup
Denmark
T: +45 4332 0990
M: info@heka-dental.dk
heka-dental.com



Homepage



Facebook



LinkedIn



Instagram