


BRUGSANVISNING

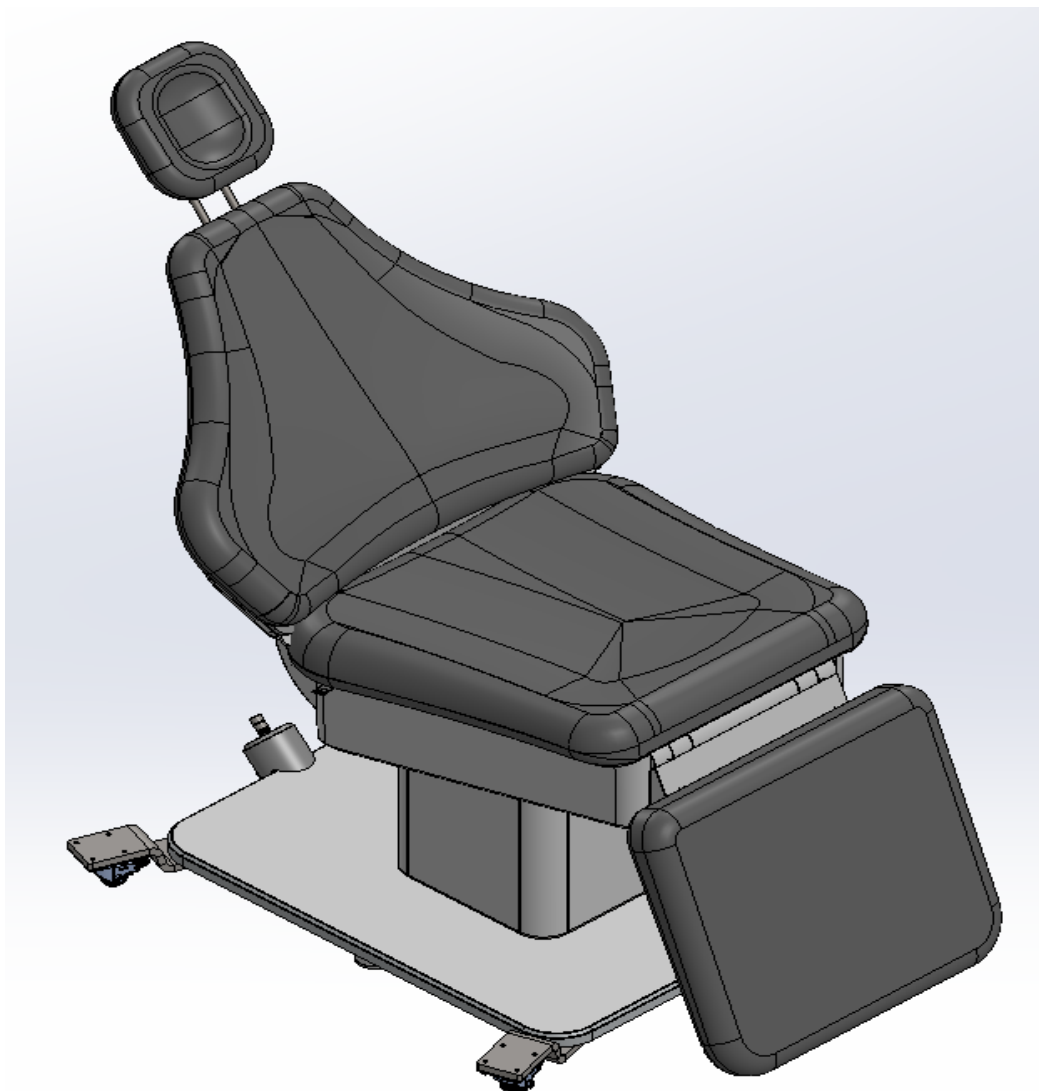


Mobile Kit Heka Patient Chair

tilbehør til
Heka Patient Chair

Beskrivelse af udstyret – SC-50708

Mobile Kit Heka Patient Chair er et tilbehør bestående af et hjulsæt med fire hjul, designet til montage på patientstolen og – mellem dentale behandlinger – til at gøre patientstolen fysisk flytbar.

Oversigt over Mobile Kit Heka Patient Chair

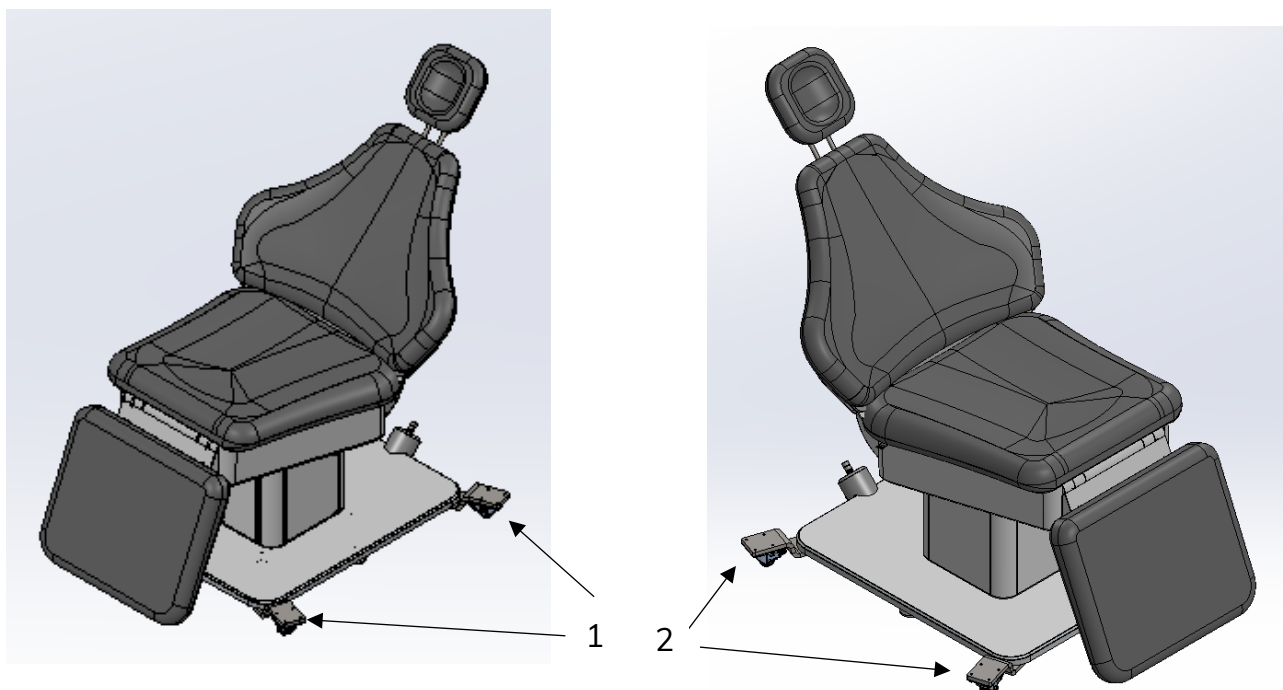

1	Hjulbeslag
2	Hjul med bremse på alle fire hjul

Sikkerhedsinstruktioner

De vedlagte sikkerhedsinstruktioner er udelukkende målrettet tilbehøret Mobile Kit Heka Patient Chair.

Vær opmærksom på de overordnede sikkerhedsinstruktioner i monteringsvejledningen (KA-2010) samt brugsanvisningen (KA-2050) for Heka Patient Chair.

Mobile Kit Heka Patient Chair må kun påmonteres på patientstole, som anvendes på gulv af beton, keramiske fliser eller andet ikke-brændbart materiale i overensstemmelse med ovennævnte monteringsvejledning (KA-2010).

WARNING

Beskadiget kabel.

Elektrisk stød som følge af et beskadiget 230V kabel kan medføre alvorlige personskader eller dødsfald.

- Kontrollér 230V kablet for skader efter flytningen.
- Patientstolen må ikke anvendes, hvis 230V kablet er beskadiget. Sluk straks for patientstolen, hvis den allerede er tændt.
- Kontakt en Heka Certified Technician (HCT), hvis 230V kablet skal udskiftes.

CAUTION

Kollision

Kollision med patienter, møbler og andet udstyr kan medføre mindre til moderate personskader.

- Patientstolen med Mobile kit påmonteret må ikke flyttes/køres med patienter i denne.
- Der må ikke være patienter i rummet mens patientstolen med påmonteret Mobile kit flyttes.
- Kontrollér, at området er frit for forhindringer, før patientstolen med Mobile kit påmonteret flyttes.
- Kontrollér, at patientstolen med Mobile kit påmonteret er frakoblet andet udstyr, inden hjulbremsen slås fra og stolen flyttes.
- Kontrollér, at hjulene (alle fire) er låst, når stolen, med Mobile kit påmonteret, er flyttet til ny placering.
- Kontroller at den nye placering af stolen med Mobile kit påmonteret har tilstrækkelig afstand til vægge og øvrige forhindringer, samt at afstanden til den dentale unit er i overensstemmelse med betjeningsvejledningerne.

CAUTION

Fastgørelse af patientstolen ved afmontering af Mobile kit

Manglende fastgørelse af patientstolen efter afmontering af Mobile kit kan medføre mindre til moderat personskaade.

- Sørg for, at patientstolen bliver boltet i gulvet som angivet i Monteringsanvisningerne (KA-2010), hvis Mobile Kit Heka Patient Chair afmonteres og patientstolen ikke længere skal være flytbar.

NOTICE

Begrænsninger for patientens vægt

Heka Patient Chair er EN/ISO 6875-godkendt til en belastning på 200 kg (440,9 lb).

Den maksimale belastning på 200 kg er også gældende for patientstol med Mobile Kit Heka Patient Chair påmonteret.

Overskrides denne vægtgrænse, fungerer patientstolen muligvis ikke korrekt.

- Sørg for, at der i patientstolen ikke placeres patienter, som overskrider vægtgrænsen.

Introduktion til betjening

Hjulbremsen aktiveres og slås fra med foden.



Hjulbremsen aktiveret



Hjulbremsen er slået fra

For at flytte stolen:

- Stolen frakobles andet udstyr, samt 230V kabel
- Slå hjulbremse fra på alle fire hjul
- Skub stolen langsomt med begge hænder

Når stolen er flyttet:

- Placer stolen med korrekt afstand til den dental unit samt overhold afstand til vægge samt øvrige forhindringer.
- Aktivér hjulbremsen på alle fire hjul
- Tilslut stolen efter anvisningerne

Rengøring

Mobile kit rengøres efter samme vilkår som anbefalingerne for rengøring af patientstolen beskrevet i brugsanvisningen for Heka Patient Chair (KA-2050).

Årlig service

NOTICE

Årlig vedligeholdelse

Manglende vedligeholdelse kan føre til funktionsfejl og medføre materielle skader.

- Brugeren er ansvarlig for at sikre, at udstyret gennemgår årlig vedligeholdelse, og for løbende at kontrollere, at alle funktioner fungerer korrekt.
- Service og vedligeholdelse må kun udføres af en Heka Certified Technician (HCt).
- Udfør ikke service eller vedligeholdelse med en patient siddende i stolen.

Ved årlig service kontrolleres:

- Bremsefunktion på alle fire hjul.
- Uhindret dreje- og rullebevægelse på alle fire hjul.

HEKA

Heka Dental A/S
Litauen Alle 4
DK-2630 Taastrup
Denmark
T: +45 4332 0990
M: info@heka-dental.dk
heka-dental.com



Homepage



Facebook



LinkedIn



Instagram