


GEBRAUCHSANWEISUNG

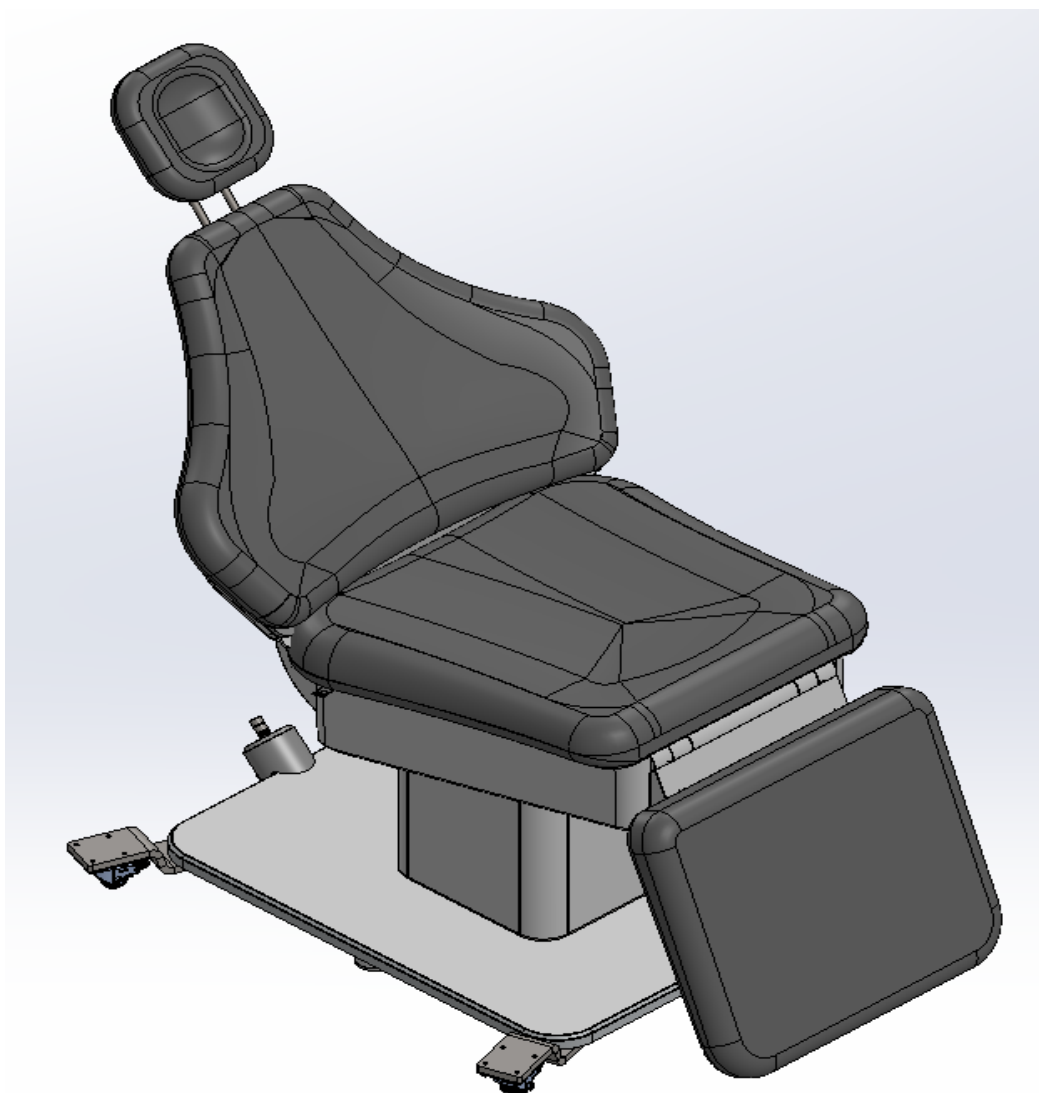


Mobile Kit Heka Patient Chair

Zubehör für
Heka Patient Chair

Beschreibung des Geräts – SC-50708

Das Mobile Kit Heka Patient Chair ist ein Zubehörteil, bestehend aus einem Radsatz mit vier Rädern, das für die Montage am Patientenstuhl und – zwischen den zahnärztlichen Behandlungen – dazu dient, den Patientenstuhl physisch beweglich zu machen.

Übersicht über das Mobile Kit Heka Patient Chair

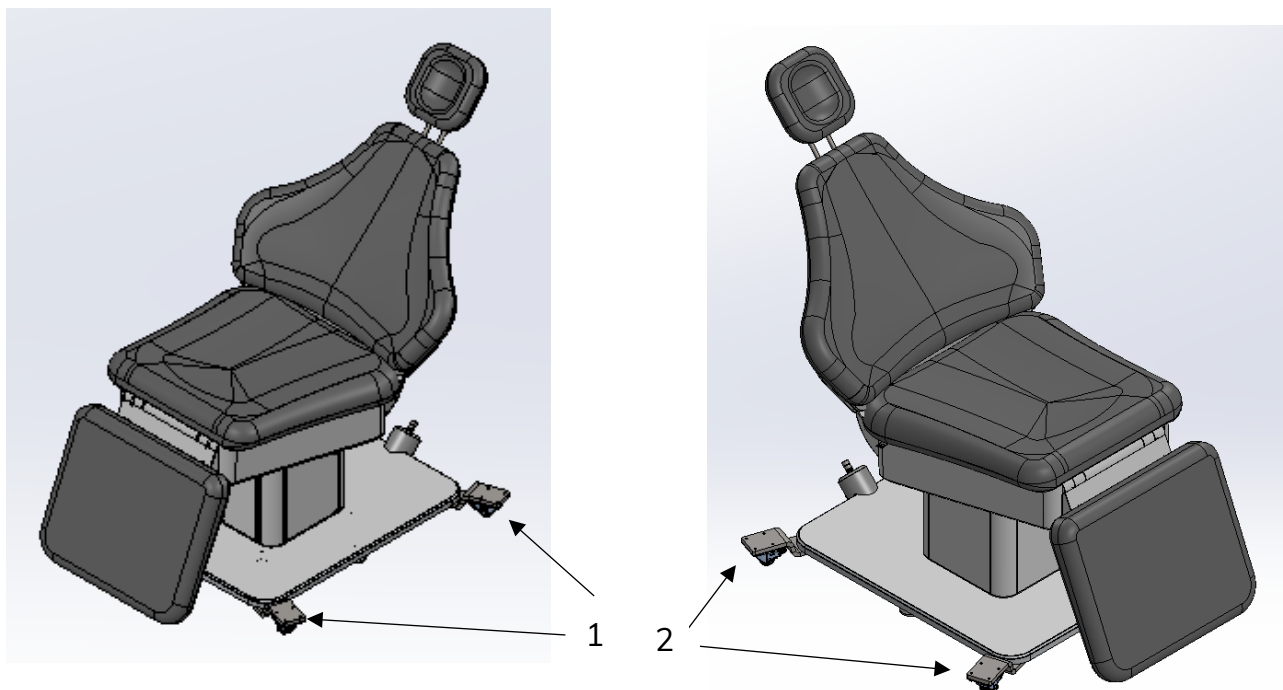

1	Radhalterung
2	Rollen mit Bremse an allen vier Rädern

Sicherheitshinweise

Die beigefügten Sicherheitshinweise beziehen sich ausschließlich auf das Zubehör „Mobile Kit Heka Patient Chair“.

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheitshinweise in der Montageanleitung (KA-2010) sowie in der Gebrauchsanweisung (KA-2050) für den Heka Patient Chair.

Das Mobile Kit Heka Patient Chair darf nur an Patientenstühlen montiert werden, die auf Böden aus Beton, Keramikfliesen oder anderem nicht brennbaren Material gemäß der oben genannten Montageanleitung (KA-2010) verwendet werden.

WARNING

Beschädigtes Kabel.

Ein Stromschlag durch ein beschädigtes 230-V-Kabel kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Überprüfen Sie das 230-V-Kabel nach dem Transport auf Beschädigungen.
- Der Patientenstuhl darf nicht verwendet werden, wenn das 230-V-Kabel beschädigt ist. Schalten Sie den Patientenstuhl sofort aus, falls er bereits eingeschaltet ist.
- Wenden Sie sich an einen Heka Certified Technician (HCt), wenn das 230-V-Kabel ausgetauscht werden muss.

CAUTION

Kollision

Kollisionen mit Patienten, Möbeln und anderen Geräten kann zu leichten bis mittelschweren Verletzungen führen.

- Der Patientenstuhl mit montiertem Mobil-Kit darf nicht bewegt/gefahren werden, wenn sich Patienten darin befinden.
- Es dürfen sich keine Patienten im Raum befinden, während der Patientenstuhl mit montiertem Mobil-Kit bewegt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass der Bereich frei von Hindernissen ist, bevor der Patientenstuhl mit montiertem Mobil-Kit bewegt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass der Patientenstuhl mit montiertem Mobil-Kit von anderen Geräten getrennt ist, bevor die Radbremsen gelöst und der Stuhl bewegt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass die Räder (alle vier) arretiert sind, wenn der Stuhl mit montiertem Mobil-Kit an den neuen Standort bewegt wurde.
- Stellen Sie sicher, dass der neue Standort des Stuhls mit montiertem Mobil-Kit einen ausreichenden Abstand zu Wänden und anderen Hindernissen

aufweist und dass der Abstand zur zahnärztlichen Behandlungseinheit den Bedienungsanweisungen entspricht.

CAUTION

Befestigung des Patientenstuhls nach Demontage des Mobil-Kits

Eine mangelhafte Befestigung des Patientenstuhls nach dem Abbau des Mobil-Kits kann zu leichten bis mittelschweren Verletzungen führen.

- Stellen Sie sicher, dass der Patientenstuhl gemäß den Montageanweisungen (KA-2010) am Boden verschraubt wird, wenn das Mobile Kit Heka Patient Chair demontiert wird und der Patientenstuhl nicht mehr beweglich sein soll.

NOTICE

Gewichtsbeschränkungen für den Patienten

Der Heka Patient Chair ist nach EN/ISO 6875 für eine Belastung von 200 kg (440,9 lb) zugelassen.

Die maximale Belastbarkeit von 200 kg gilt auch für den Patientenstuhl mit montiertem Mobile Kit Heka Patient Chair.

Wird diese Gewichtsgrenze überschritten, funktioniert der Patientenstuhl möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

- Stellen Sie sicher, dass keine Patienten in den Patientenstuhl gesetzt werden, die die Gewichtsgrenze überschreiten.

Einführung in die Bedienung

Die Radbremse wird mit dem Fuß aktiviert und deaktiviert.



Die Radbremse ist aktiviert



Die Radbremse ist deaktiviert

So bewegen Sie den Rollstuhl:

- Der Stuhl wird von anderen Geräten sowie vom 230-V-Kabel getrennt
- Deaktivieren Sie die Radbremse an allen vier Rädern
- Schieben Sie den Rollstuhl langsam mit beiden Händen

Wenn der Stuhl bewegt wurde:

- Stellen Sie den Stuhl in dem richtigen Abstand zur Dentaleinheit auf und achten Sie auf den Abstand zu Wänden und anderen Hindernissen.
- Aktivieren Sie die Radbremse an allen vier Rädern
- Schließen Sie den Stuhl gemäß den Anweisungen an

Reinigung

Das Mobil-Kit wird gemäß den gleichen Bedingungen gereinigt wie die Empfehlungen zur Reinigung des Patientenstuhls, die in der Gebrauchsanweisung für den Heka Patient Chair (KA-2050) beschrieben sind.

Jährliche Wartung

NOTICE

Jährliche Wartung

Eine unterlassene Wartung kann zu Funktionsstörungen und Sachschäden führen.

- Der Benutzer ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass das Gerät einer jährlichen Wartung unterzogen wird, und regelmäßig zu überprüfen, ob alle Funktionen ordnungsgemäß funktionieren.
- Service und Wartung dürfen nur von einem Heka Certified Technician (HCt) durchgeführt werden.
- Führen Sie keine Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten durch, während ein Patient im Stuhl sitzt.

Bei der jährlichen Wartung wird Folgendes überprüft:

- Die Bremsfunktion an allen vier Rädern.
- Ungehinderte Dreh- und Rollbewegung aller vier Räder.

HEKA

Heka Dental A/S
Litauen Alle 4
DK-2630 Taastrup
Denmark
T: +45 4332 0990
M: info@heka-dental.dk
heka-dental.com



Homepage



Facebook



LinkedIn



Instagram